

PAKETLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ & STERİLİZASYON VE TEMİZLEME KONTROLÜNDE UZMAN



GÜNLÜK VALİDASYON İÇİN TEST SİSTEMİ
YAPIŞTIRMA TEST (SEAL-CHECK) YAPRAĞI
SEAL-CHECK Plasma (Tyvek®)

Paketleme Cihazlarının Yapıştırma Kalitesi
Testi için Operasyonel Kalifikasyonu (OQ)
Günlük Yapıştırma (Validasyon) Testi

Gündem Sağlık ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mecidiyeköy Mah, Şehit Er Cihan Namı Cad.,
Mert Sok., No: 1A Şişli 34381 İstanbul

Mersis: 0428009144500018 KEP: gundemasaglik@hs01.kep.tr

Zincirlikuyu Vd. 4280091445 / Tic Sicil No: 438749 - 386331

Tel.: (0212) 213 5353 Pbx. Faks: (0212) 212 2498

E-Mail: gundem@gundemas.com Web: www.gundemas.com

Sipariş no.:	Ürün	Tanımlama / İçerik
222-110-074	A174 GM174SCS-40; SEAL-CHECK Plasma -40cm	Plasma GÜNLÜK YAPIŞTIRMA TEST YAPRAĞI. TS EN ISO 11607-2 ve DIN 58953'e uygun. İçerik: 1 Kutuda 50 x 2 = 100 Adet
222-110-076	A176 GM176SCS-60; SEAL-CHECK Plasma - 60cm	Plasma GÜNLÜK YAPIŞTIRMA TEST YAPRAĞI. TS EN ISO 11607-2 ve DIN 58953'e uygun. İçerik: 1 Kutuda 50 x 2 = 100 Adet

Bu testler günlük olarak her sabah, kapatma cihazı kullanılmaya başlamadan önce yapılmalı ve denetlemeler için arşivlenmelidir. Bu testler TS EN-ISO 11607-2 ve DIN 58953'de tanımlanmıştır. **A174 GM174SCS-40; SEAL- CHECK Plasma -40cm**, test yaprakları 20 ve 40cm genişliğindeki poşetler, **A176 GM176SCS-60; SEAL-CHECK Plasma - 60cm** test yaprakları ise 30 ve 60cm genişliğindeki poşetler için üretilmiştir. Her ikisi de hem döner başlıklı hem de Çeneli kapatma cihazlarının TS EN ISO 11607-2'ye göre "Kapatma Testi" için standartlara uygun üretilmiştir. Bu test yapraklarından biri, sizin kullandığınız kapatma cihazınızın çene genişliğine göre uygundur. İstenirse "Makas" sembolü kısımlarından kesilerek kullanılabilir ancak **döner başlıklı cihazların testlerini yaparken asla işaretlenmiş yerlerin dışından (20cm'den daha dar) keserek kullanmayın!** Doğru uzunlukta kesilirse artan kısım sonradan kullanılabilir.

Kullanım şekli: Seal-Check yaprağını paketinden çıkartıp makinenizin maksimum kapatma genişliğine uygun bir poşete girecek şekilde keserek yerleştiriniz.

Poşeti cihazınıza her zamanki gibi yerleştiriniz. Yapıştırma işlemi tamamlandığı zaman aşağıdaki gibi başarılı ya da varsa hatalı yapışan yerler net bir şekilde görülecektir. Hatalı durumda cihazınızın bakımı için cihazınızı aldığınız yere başvurarak, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürülmesi için gereken parça değişimlerinin yapılmasını sağlayınız. Başarılı test sonucu cihazınızın EN ISO 11607-2 standardına uygun çalıştığını gösterir. Aşağıdaki test sonucu günlük olarak dokümanite edilebilir.

Konuyla ilgili başka teknik sorularınız varsa, bize ya da bayiimize başvurabilirsiniz. Size teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

BAŞARILI / SUCCESSFUL	BAŞARISIZ / UNSUCCESSFUL
SEAL CHECK Testing for sealing machines Kapatma Cihazları testi için REF: 222-110-060 LOT: 1000160615 Gündem Tel: +90 212 213 5353 Pbx. Fax: +90 212 212 2498 Seal / Cihaz: GÜNDEM Makine Location / Yer: KATİT Approval / Onay: BORA ŞENER Date / Tarih: 13.12.2017 Remarks / Notlar: Başarılı	SEAL CHECK Testing for sealing machines Kapatma Cihazları testi için REF: 222-110-060 LOT: 1000160615 Gündem Tel: +90 212 213 5353 Pbx. Fax: +90 212 212 2498 Seal / Cihaz: SW-1266003 Location / Yer: TENDİK SERVİS Approval / Onay: BORA Date / Tarih: 03.10.2017 Remarks / Notlar: X
BAŞARILI TEST SONUCU	BAŞARISIZ TEST SONUCU